



РИКТА



RU

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ от лазерного излучения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN

LASER SAFETY GLASSES / GOGGLES

OPERATING MANUAL

Ruk_Goggles_RU-EN 2018-02

RU

Защитные очки соответствуют европейским стандартам EN207/208 и маркированы CE.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- очки защитные1 шт.
- руководство по эксплуатации1 шт.
- защитный чехол1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Очки предназначены для защиты глаз от рассеянного и диффузно отраженного излучения медицинских лазерных терапевтических установок в диапазоне 780–1200 нм (см. Технические характеристики).

Очки выполнены из закаленного поликарбонатного стекла.

Средний срок службы — не менее 2 лет.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием проверяйте целостность очков.
Не следует пользоваться очками, если на них есть трещины или царапины.
2. Очки следует содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений, химических реагентов, прямых солнечных лучей контактов с твердыми поверхностями.
3. При наличии загрязнений следует промыть очки раствором мягкого чистящего средства, после чего протереть поверхность мягкой чистой тканью.
Не используйте абразивные очистители!

EN

These protective goggles comply with European standards

EN 207/208 and are CE marked.

DELIVERY SET:

- glasses/goggles1 pair
- operating manual1 pc.
- protective case1 pc.

INTENDED USE

The goggles are designed to protect the eye from scattered and diffuse reflected laser beam of therapeutic medical laser devices in the range of 780–1200 nm (see Technical parameters).

Ultra-light-weight glasses are made from hardened polycarbonate.

The average service life — at least 2 years.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before use, check the integrity of safety glasses.


Do not use the glasses if there are cracks and scratches.

2. The laser safety glasses should be kept clean and protected from mechanical damage, chemicals, direct sunlight, contact with hard surfaces.

3. In the presence of dirt, rinse the glasses with a solution of soft cleaning agent, then wipe the surface with a soft clean cloth.

Do not use abrasive cleaners!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL PARAMETERS

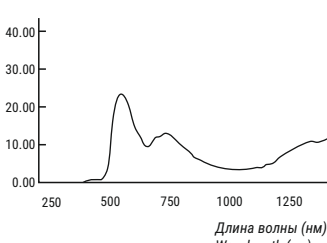

RU

ООО «РИКТАМЕД»

111020 г. Москва

ул. Боровая, д. 7, с. 7

Тел.: +7 495 926 78 07

8 800 200 57 30

EN

RIKTAMED Ltd.

Borovaya st., 7/7,

111020 Moscow, Russia

Tel.: +7 495 926 78 07